



Od uzorkovanja do kompletne krvne slike za manje od 1 minute

Medonic™M32 hematološki analizator dolazi s naprednim funkcijama. Od liječničkih ordinacija i manjih laboratorija do srednje velikih kliničkih jedinica, sustav pruža 22-parametarsku i 3-dijelnu analizu kompletne krvne slike (CBC), uz izvanrednu jednostavnost korištenja, točnost i pouzdanost.

Ključno je da Medonic M32 analizator nudi širok izbor načina za uzorkovanje: otvorena epruveta, predrazrijeđen uzorak, zatvorena epruveta, automatski uređaj za umetanje uzoraka i mikrokapilarni adapter (MPA).

MPA metoda, koja se temelji na jednostavnom uzorkovanju iz prsta izravno od pacijenta, ekskluzivna je značajka u današnjim hematološkim analizatorima.

Mikrokapilarni ulaz – potrebno je samo 20 µL krvi.

Jednostavno napraviti ubod u prst, uzeti krv u posebnu mikrokapilaru od 20 µL, umetnuti je u adapter i staviti u analizator. Otprilike jednu minutu kasnije, svi ključni rezultati bit će prikazani na osjetljivom zaslonu. Nije potrebna priprema, predrazrjeđivanje niti vakuumske epruvete.




Mikrokapilarni adapter (MPA) omogućava brz i jednostavan način za dobivanje rezultata kompletne krvne slike (CBC).

Jednostavno uzmite uzorak i pregledajte rezultate



1. Napraviti duboki i čvrsti ubod na koži

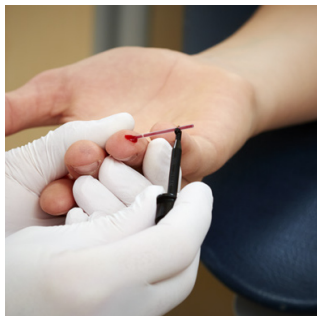

2. Prikupiti 20 µL krvi u mikrokapilaru



3. Umetnuti kapilaru u adapter



4. Adapter postavljamo u analizator

5. Rezultati kompletne krvne slike prikazat će se na zaslonu za manje od jedne minute.

Posebno pogodan za djecu

Kako je ubod u prst uglavnom bezbolan, mikrokapilarni adapter (MPA) je prikladan način za uzimanje i analizu uzoraka krvi od djece. Ova funkcionalnost omogućuje brz alat za preliminarnu analizu krvnih stanica prije donacije.



Hematologija je dostupna svima.

Medonic M32 analizator kombinira izvanrednu funkcionalnost s maksimalnom fleksibilnošću. Brz je i jednostavan za korištenje, njegove rezultate podržava visoka pouzdanost, integriran sustav praćenja kvalitete i niska potreba za održavanjem.

Osim toga, cijeli sustav koji uključuje analizator, reagense i materijale za kontrolu kvalitete, osigurava izvanredne rezultate iz dana u dan.

Kontaktirajte nas danas za više informacija o Medonic M32 hematološkom analizatoru.



Distributer za Hrvatsku:

B.I.G. B.L.U.E. d.o.o.

Pina Budicina 13, 52100 Pula (Hrvatska)

Tel: +385 (0) 52 218518

mail: [info\(at\)bigblue.hr](mailto:info(at)bigblue.hr)

www.bigblue.hr